



#### Patch anti-douleur BlueTouch

- Technologie innovante LED bleue
- Pour douleurs dorsales musculaires
- Sans fil
- Doit être utilisé avec une sangle

PR3092/00

## Soulage naturellement le mal de dos

Traitement novateur de la douleur par LED bleues

Le BlueTouch Philips permet de soulager naturellement le mal de dos. Les LED bleues stimulent le processus d'auto-rétablissement du corps ; la douleur régresse sensiblement. Le BlueTouch Philips est disponible en pharmacie sans ordonnance.

### Avantages

#### Une première mondiale contre le mal de dos

- Traitement exclusif de la douleur par LED bleues
- Nouveaux traitements sans médicaments
- Soulagement : chaleur et processus naturel du corps

#### Application simple, pratique et discrète

- Sangles dorsales pour un confort optimal
- Courtes durées de traitement, trois niveaux d'intensité
- Portable et discret : à intégrer aux habitudes quotidiennes

#### Pour le quotidien : longue durée de vie, sans danger

- Utilisation sûre
- Nettoyage simple

#### Faites l'essai

- Essayez-le : délai de rétractation de 30 jours
- Les premiers effets anti-douleur sont observés au bout de 5 utilisations

**PHILIPS**

## Fonctions

### Première mondiale



L'utilisation de LED bleues pour soulager le mal de dos est une première mondiale dans le domaine des nouveaux traitements. Le BlueTouch Philips permet de soulager la douleur de manière complètement naturelle : la lumière émise par les LED bleues stimule les processus de soulagement de la douleur propres au corps. Le BlueTouch a été spécialement développé pour une utilisation sur le haut et/ou le bas du dos. Avec son mode d'action naturel, il représente une alternative aux traitements médicamenteux. Le BlueTouch Philips est disponible sans ordonnance en pharmacie.

### Alternative aux médicaments



Le principal avantage du traitement par LED bleues est qu'il est naturel. La lumière bleue stimule les propres processus du corps. Lorsque la lumière des LED bleues atteint la peau, les réserves de molécules d'oxyde nitrique (NO) du corps sont libérées et transportées vers le muscle siège de la douleur. Cette petite molécule a un grand effet : les douleurs dorsales sont soulagées de manière naturelle, sans les effets secondaires observés avec les traitements médicamenteux.

### Chaleur et oxyde nitrique



En plus du soulagement observable apporté par la chaleur, la lumière des LED bleues stimule la production d'oxyde nitrique (NO) dans le corps. Ainsi, le transfert d'oxygène et de nutriments vers le muscle est amélioré, tandis que la transmission des signaux de douleur est réduite. Les muscles peuvent se relaxer et les douleurs diminuent. Le NO est réputé antioxydant, cytoprotecteur et anti-inflammatoire. Ainsi, il permet d'éviter que les muscles et les nerfs ne s'endommagent et que vous ne vous blessiez à nouveau. Le BlueTouch Philips ne fait pas que soulager : il a également une utilité préventive.

### Sangles dorsales



Grâce à ses sangles dorsales confortables et individuellement réglables, le BlueTouch Philips peut être porté sous des vêtements en toute discrétion. Fabriquées avec des textiles de qualité supérieure, elles ont été spécialement développées pour le haut et le bas du dos. Insérez simplement le BlueTouch dans l'ouverture de la sangle dorsale fournie, puis placez-la contre votre corps, et attachez-la à l'aide des fixations en Velcro. Ainsi, le port de votre BlueTouch est confortable à tout moment, à la maison comme en déplacement.

### Durée du traitement

Stufe	Behandlungs-dauer	Max. Anwendungen pro Tag
1   Sanft	30 Min.	2
2   Medium	20 Min.	2
3   Stark	15 Min.	2

Vous pouvez utiliser le BlueTouch Philips jusqu'à deux fois par jour. La durée de chaque traitement dépend du niveau d'intensité sélectionné. En Mode 1 (léger), utilisez l'appareil pendant 30 minutes maximum, en Mode 2 (moyen), pendant 20 minutes, et en Mode 3 (intense), pendant 15 minutes. Sélectionnez le niveau d'intensité en fonction de vos préférences. Ils offrent une intensité lumineuse et une température différentes. Grâce à l'action des LED bleues, le BlueTouch peut soulager efficacement les douleurs dorsales, lorsque qu'il est utilisé tous les jours.

### Portable et discret



Intégrez facilement le traitement de vos douleurs dorsales à vos habitudes quotidiennes avec le BlueTouch Philips. L'appareil fonctionne avec des piles, et donc sans câbles, ce qui vous permet de vous déplacer en toute liberté pendant le traitement. D'une taille compacte, le BlueTouch peut être porté discrètement sous les vêtements. Ainsi, vous pourrez vaquer à vos activités quotidiennes, que ce soit au bureau, à la maison ou dans la rue, pendant votre traitement.

### Sécurité



L'utilisation du BlueTouch Philips est absolument sans danger. La lumière des LED bleues stimule uniquement les processus naturels du corps pour soulager la douleur. Il n'y a donc pas d'effets secondaires comme ceux que l'on peut observer avec les traitements médicamenteux. Dès que vous allumez l'appareil, les LED s'allument en mode de feedback basse puissance. Le BlueTouch ne passe en pleine puissance que lorsque le capteur de l'appareil est en contact avec la peau. Il s'éteint automatiquement après le traitement. Un capteur de température surveille en outre la température de votre peau.

## Nettoyage simple



Le BlueTouch Philips est facile à nettoyer : essayez simplement la surface avec un chiffon doux humidifié, ou une brosse très douce. Ne plongez pas l'appareil

dans l'eau et ne le placez pas sous l'eau courante. La sangle dorsale passe à la machine à laver à 30 °C.

## Délai de rétractation de 30 jours

Essayez le BlueTouch Philips ! Si vous n'êtes pas satisfait, vous serez remboursé dans un délai de 30 jours à compter de la date d'achat.

## Des résultats au bout de 5 jours d'utilisation

Selon les études, les premiers effets anti-douleur sont généralement observés au bout de 5 jours d'utilisation du BlueTouch.

## Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

### Traitement naturel de la douleur

Le BlueTouch contre le mal de dos	Soulagement observable de la douleur
Patch à LED novateur	40 LED bleues haute technologie
Absolument naturel	Sans produits chimiques

### Zones d'application

Pour le mal de dos	modéré, musculaire chronique
Région lombaire	Colonne vertébrale et région lombaire
Haut du dos	Épaules et cervicales

### Facile à utiliser

Courte durée d'utilisation	De 15 à 30 min deux fois par jour
Mode 1 (léger)	Deux fois par jour pendant 30 min
Mode 2 (moyen)	Deux fois par jour pendant 20 min
Mode 3 (élevé)	Deux fois par jour pendant 15 min

### Spécificités

Tension nominale	100-240 V
Fréquence nominale	50-60 Hz
Puissance nominale	15 W
Classe	Appareil médical de classe IIa
Classification	Groupe de risque 1
Pénétration par l'eau	IP22
Dose quotidienne maximale	< 90 J/cm <sup>2</sup>
Type de batterie	Li-Ion
Longueur d'ondes de la lumière émise par les LED bleues	453 nm

### Connexions

Adaptateur secteur	100-240 V
--------------------	-----------

### Prises

Micro USB	Charge avec câble micro-USB
-----------	-----------------------------

### Fonctionnement

Taux d'humidité relative	de 30 % à 90 %
Température	de +10 °C à +35 °C

### Rangement

Taux d'humidité relative	30 à 90 % (aucune condensation)
Température	de -20 °C à +35 °C

### Poids et dimensions

Poids du BlueTouch	0,168 kg
Dimensions du patch (l x H x P)	353 x 229 x 66 mm
Dimensions des sangles (l x H x P)	229 x 179 x 30 mm

### Sécurité

BlueTouch	Certifié CE et sans danger
Mode feedback basse puissance	En contact avec l'air
Capteur de surchauffe	Arrêt automatique
Arrêt à la fin du traitement	Automatique

### Dimensions de l'emballage

Hauteur	20.50 cm
Largeur	36.20 cm
Profondeur	5.10 cm
Poids net	0.37 kg
Poids brut	0.59 kg
EAN	08718291654513
Nombre de produits inclus	1
Pays d'origine	RO
Code du système harmonisé	901890

### Carton externe

Longueur	36.90 cm
Largeur	21.20 cm
Hauteur	21.80 cm
Poids brut	2.55 kg
EAN	18718291654510
Nombre d'emballages	4



Les données sont sujettes à changement  
2017, février 16

Version: 7.1.2  
EAN: 08718291654513

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)