


Neomounts[®]

BY NEWSTAR

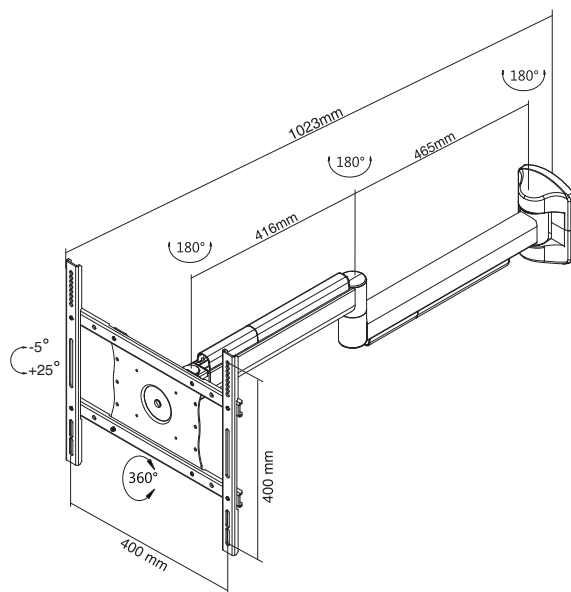

FPMA-HAW050

EN Medical mount

NL Medische steun

DE Medizinische Halterung

FR Support médical

IT Supporto medico

ES Soporte médico

PT Suporte medico

DK Medicinsk beslag

NO Medisinsk feste

SE Medicinskt fäste

FI Medical teline

PL Uchwyt medyczny

CS Držák pro lékařské účely


SK Držiak na lekárske vybavenie

RO Suport medical

FPMA-HAW050




PARTS

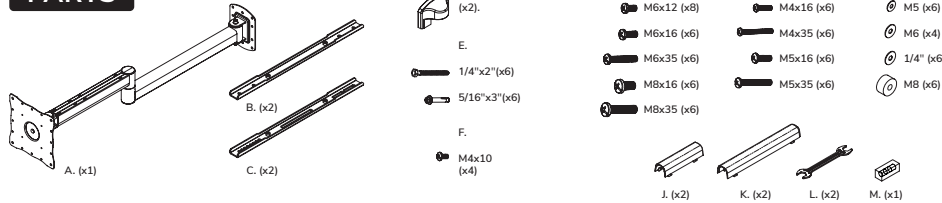


STEP 1

- EN** Remove the covers and VESA plate, install the wall plate and place the covers
- NL** Verwijder de afdekkappen en VESA plaat, bevestig de muurbeugel en plaats de afdekkappen
- DE** Entfernen der Abdeckung und der VESA-Platte, befestigen der Halterungsplatte und Abdeckung montieren
- FR** Retirez les capuchons et la plaque VESA, installez la plaque murale et placez les capuchons de protection
- IT** Rimuovere le coperte e la piastra VESA, installare la piastra di parete e metti le coperte
- ES** Retire las tapas de la cubierta y la placa VESA, fije el soporte de pared y coloque las tapas de la cubierta
- PT** Remova as tampas e a placa VESA, instale a placa do suporte de parede e coloque as tampas
- PL** Zdejmij osłony i płytkę VESA, zamontuj płytę ścienną i umieść osłony

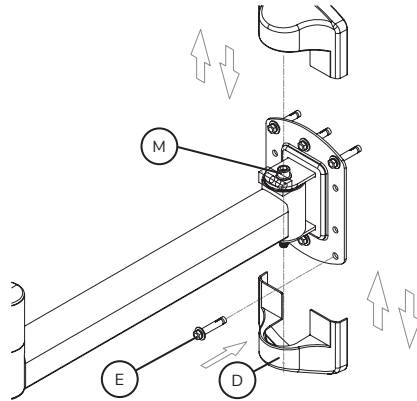


STEP 2

- EN** Attach the VESA plate to the screen
- NL** Bevestig de VESA plaat aan het scherm
- DE** VESA-Platte am Monitor fixieren
- FR** Fixez la plaque VESA à l'écran
- IT** Collegamento del piatto VESA al monitor
- ES** Coloque la placa VESA en la pantalla
- PT** Colocar a placa VESA no monitor
- PL** Montaż płytki VESA do monitora

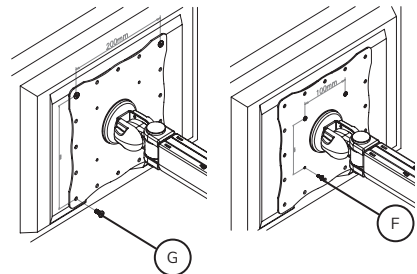


OPTION A

- EN** Attach the VESA plate to the screen
- NL** Bevestig de VESA plaat aan het scherm
- DE** VESA-Platte am Monitor fixieren
- FR** Fixez la plaque VESA à l'écran
- IT** Collegamento del piatto VESA al monitor
- ES** Coloque la placa VESA en la pantalla
- PT** Colocar a placa VESA no monitor
- PL** Montaż płytki VESA do monitora

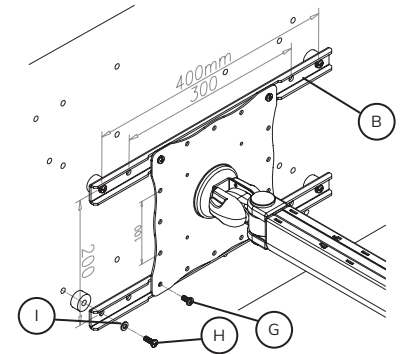

OPTION B

- EN** Attach the VESA plate to the screen
- NL** Bevestig de VESA plaat aan het scherm
- DE** VESA-Platte am Monitor fixieren
- FR** Fixez la plaque VESA à l'écran
- IT** Collegamento del piatto VESA al monitor
- ES** Coloque la placa VESA en la pantalla
- PT** Colocar a placa VESA no monitor
- PL** Montaż płytki VESA do monitora

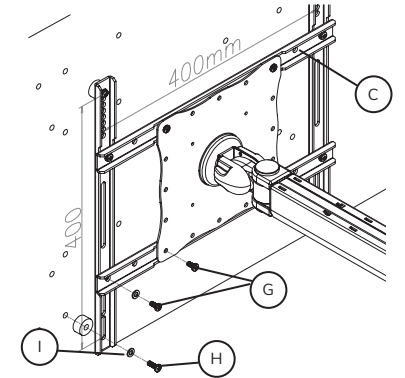

STEP 5

- EN** Run cable through the cable cover and adjust the mount to your desired position
- NL** Leid de kabel(s) door de kabelgoot en stel de steun in op de gewenste positie
- DE** Kabel durch die Kabelabdeckung führen und positionieren der Halterung in der gewünschten Position
- FR** Positionnez vos câbles dans les chemins prévus à cet effet et ajustez le support à la position souhaitée
- IT** Far passare il cavo attraverso la copertura del cavo e regolare il supporto nella posizione desiderata
- ES** Pase el (los) cable(s) a través de la bandeja para cables y establecer el soporte en la posición deseada
- PT** Passe o cabo pela tampa do cabo e ajuste o suporte na posição desejada
- PL** Przeprowadź kabel przez osłonę kabla i dostosuj pozycję uchwytu do twoich wymagań

